

**AkusTone™**  
spray do uszu  
Instrukcja używania

**AkusTone** to wyrób medyczny, którego składniki w łagodny sposób rozpuszczają woskowinę zalegającą w zewnętrznym przewodzie słuchowym, umożliwiając zachowanie właściwej higieny uszu. Dzięki swojemu działaniu **AkusTone** ułatwia usuwanie korków woskowinowych oraz przeciwdziała ich powstawaniu a także zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia skóry, łagodząc podrażnienia. Ponadto **AkusTone** powleka skórę przewodu słuchowego delikatnym filmem, przeciwdziałając zaleganiu wody w uchu w trakcie kąpieli lub uprawiania sportów wodnych. Specjalna końcówka umożliwia łatwe rozpylenie produktu w przewodzie słuchowym bez wytwarzania nadmiernego ciśnienia.

**AkusTone:**

- rozpuszcza zalegającą woskowinę,
- przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych,
- umożliwia zachowanie właściwej higieny uszu w przypadku nadmiernej produkcji woskowiny u dzieci lub osób noszących aparaty słuchowe lub słuchawki,
- przeciwdziała zaleganiu wody w przewodzie słuchowym w trakcie kąpieli lub uprawiania sportów wodnych, u osób z tendencją do nawracających infekcji ucha zewnętrznego.

**Zastosowanie i sposób postępowania z wyrobem:**

Ze względu na formę aplikacji, produkt jest równomiernie rozprowadzany w przewodzie słuchowym, dzięki czemu nie ma konieczności głębokiego wsuwania aplikatora do ucha.

Dzieci i niemowlęta powyżej 3. miesiąca życia: 1 rozpylenie, dorośli: 1-2 rozpylenia do przewodu słuchowego zewnętrznego:

→ Rozpuszczanie korków woskowinowych:

- stosować 3-5 razy dziennie, aż do rozpuszczenia zalegającej woskowiny.

→ Działanie profilaktyczne oraz odpowiednia higiena uszu:

- stosować 1-2 razy w tygodniu w celu zapobiegania tworzeniu się korków woskowinowych,
- stosować bezpośrednio przed kąpielą w celu przeciwdziałania zaleganiu wody w uchu.

U dzieci i niemowląt wyrób powinien być aplikowany z zachowaniem ostrożności przez osobę dorosłą. Aplikatora nie wsuwać zbyt głęboko do ucha, aby nie uszkodzić narządu słuchu. Po zastosowaniu wyrobu nie ma potrzeby dodatkowego przepłukiwania przewodu słuchowego. Przed pierwszym użyciem należy kilka razy energicznie nacisnąć pompkę dozownika w celu jego napełnienia i uzyskania prawidłowego rozpylenia wyrobu. Po użyciu wyrobu, końcówkę należy umyć pod bieżącą wodą i delikatnie osuszyć. W przypadku wystąpienia trudności z aplikacją, końcówkę aplikatora należy zdjąć, po czym ponownie umieścić na dozowniku. [przedstawienia graficzne]

**Skład:**

Oliwa z oliwek, olej migdałowy, olej jojoba, parafina ciekła, witamina E, polisorbate 80.

Nie zawiera wody ani konserwantów.

**Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności:**

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu. Nie stosować w przypadku chorób narządu słuchu, perforacji błony bębenkowej lub gdy w uchu znajduje się ciało obce. Nie stosować do oczu, nosa lub jamy ustnej. U niemowląt i małych dzieci poniżej 1. roku życia stosowanie wyrobu należy skonsultować z lekarzem. W przypadku rozpuszczania korków woskowinowych, jeżeli problemy ze słuchem lub inne dolegliwości nie ustąpią po 5 dniach stosowania, należy skonsultować się z lekarzem. Ze względów higienicznych zalecane jest stosowanie wyrobu przez jedną osobę.

**Miejsce i warunki przechowywania:**

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu. Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.



Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151,  
95-200 Pabianice



Data wydania instrukcji: 12/2017

**Oznaczenie symboli na opakowaniu:**


nr serii



termin ważności



zajrzyj do instrukcji używania

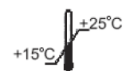

ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania



wytwórca